





Testkasett i foliepåse

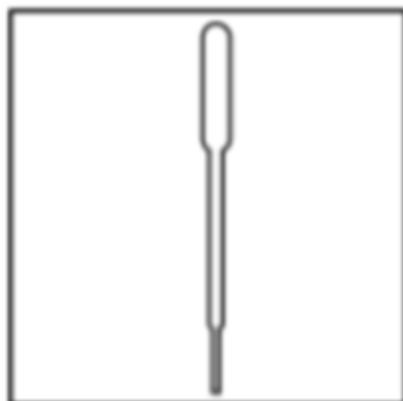

Engångspipett

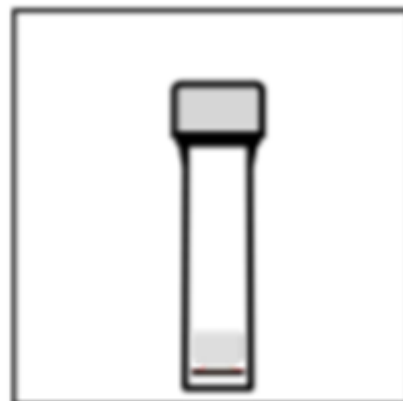

**Salivrör med 1ml
extraktionslösning**



**Tratt (används med
salivrör)**




Bruksanvisningar

Provtagning och förberedelse

- Detta test är ett snabbt COVID-19 antigen test, det genomförs med saliv.
- Konsumera varken mat eller dryck 30 minuter innan testtagning, undvik även tobak och tuggummi under denna tid då det kan påverka provresultatet.
- Tvätta händerna innan testtagning samt undvik att vidröra insidan eller kanten av tratten för att undvika kontamination.
- Läs instruktionen innan provtagning, och lägg fram innehållet i testet, se till att ha ett tidtagarur i närheten (ex. mobil).


Salivprovtagning


- Placera tratten på salivröret (se illustration).
- Harkla fram saliv från halsen.
- Håll tratten nära dina läppar och låt saliv rinna ner i salivröret.
Märkningen på salivröret indikerar hur mycket saliv som krävs för provtagning (motsvarar ungefär 1ml).

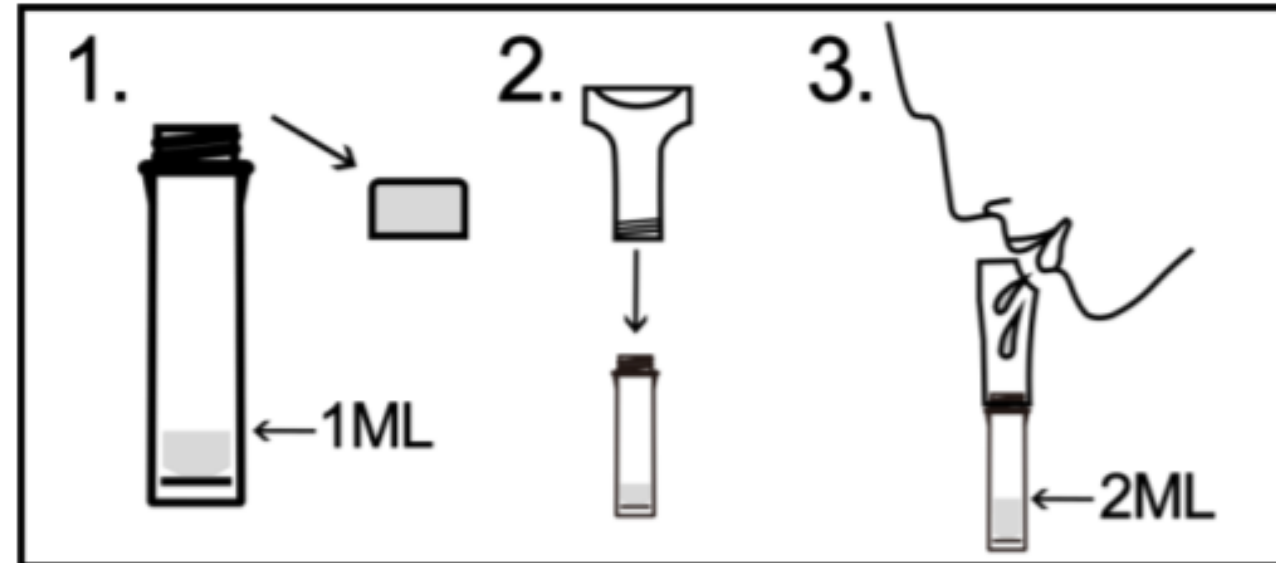

Procedur för testning

- Vänligen kassera tratten. Stäng salivröret med inkluderat lock.
- Skaka salivröret ordentligt, minst 10 gånger för att blanda saliven med extraktionslösningen.
- Ta försiktigt av locket och extrahera innehållet med engångspipetten.
- Ta fram testkasetten ur dess förpackning och placera den på en platt ren yta. Droppa tre droppar av salivprovet i testkasettens provbrun (markerad S)
- Starta tidtagning och läs resultatet efter 15 minuter.

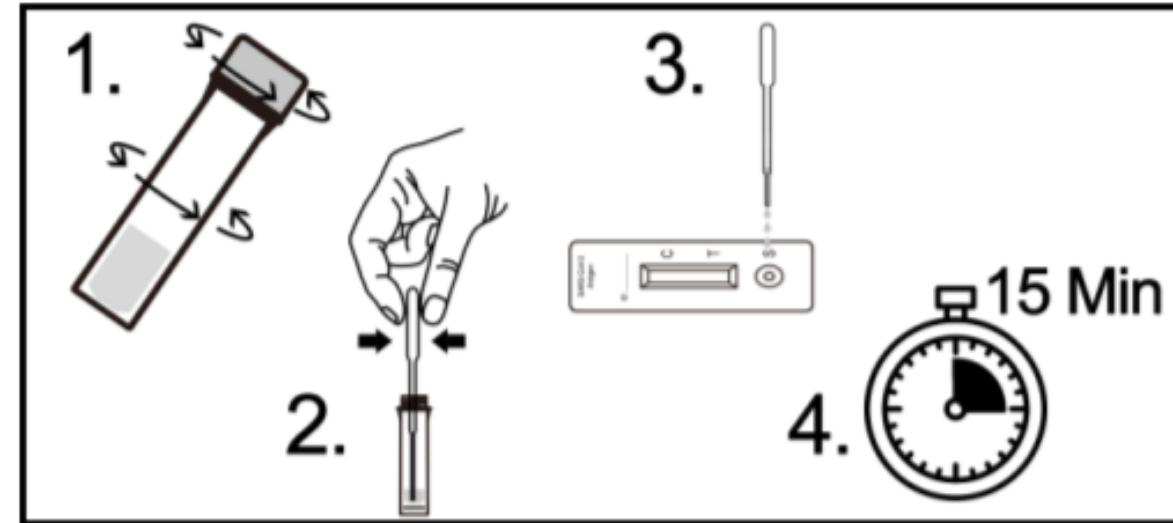

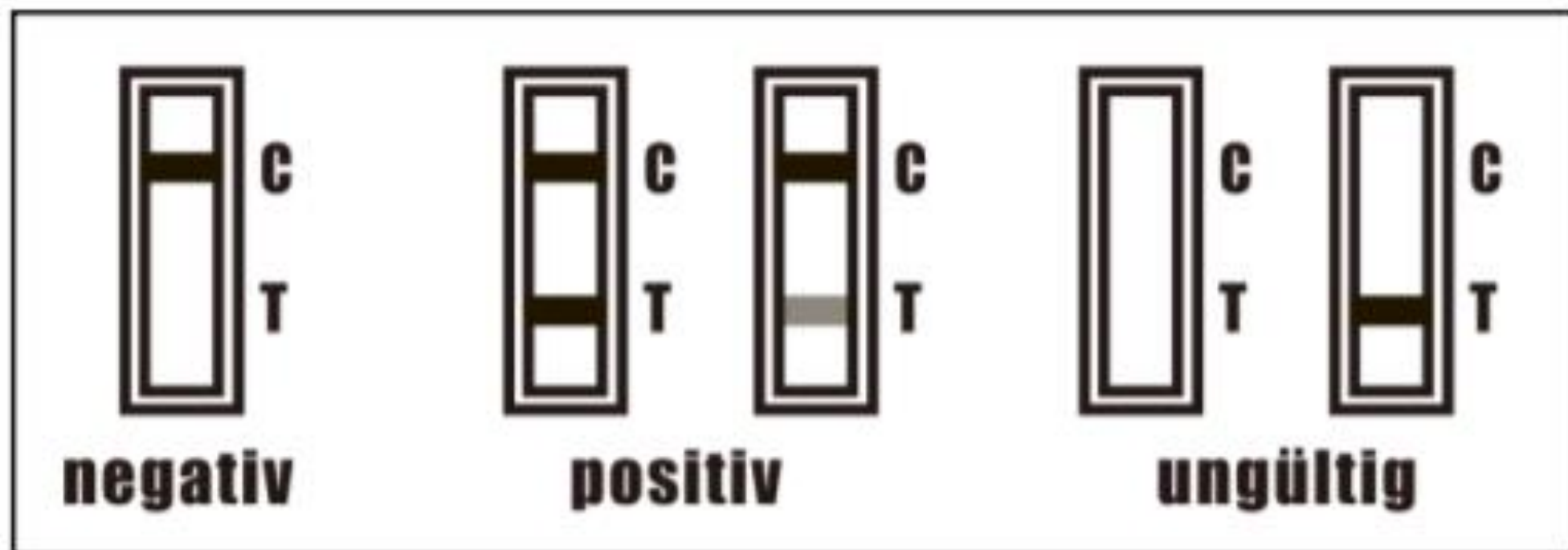

INTERPRETATION OF THE RESULTS

Positive: Two lines appear. A colored line appears in the control area (C) and another colored line appears in the test area (T); this can vary in terms of intensity and visibility depending on the amount of SARS-CoV-2 in the sample.

Negative: A colored line appears in the control area (C), but no line in the Test area (T).

Invalid: Either no line or only one line appears in the test area (T). Insufficient sample volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat all steps with a new test.